

**CLEANISEPT®**

- ✓ nie zawiera aldehydów
- ✓ nie zawiera fenoli

**Koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni**

- Niezawierający aldehydów środek o dużej sile mycia
- Na liście DVG środków dezynfekcyjnych
- wykorzystywanych w sektorze spożywczym

Nie zawiera środków zapachowych



CE 0482

**TYP PREPARATU**

**Cleanisept®** jest wolnym od aldehydów koncentratem do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego oraz wszelkiego rodzaju powierzchni. Bezalkoholowa formuła oparta jest na bazie nowoczesnych czwartorzędowych związków amonowych. **Cleanisept®** jest przyjazny w użyciu ze względu na niską toksyczność, posiada dużą siłę mycia oraz nie zawiera związków zapachowych. Szczególnie polecany do użytku w przemyśle spożywczym, w kuchniach oraz stołówkach jak również do mycia i dezynfekcji powierzchni wykonanych ze szkła akrylowego.

**Cleanisept®** spełnia ustawowe wymagania bhp w sprawie unikania uczulających, niebezpiecznych materiałów w medycynie ludzkiej.

**ZASTOSOWANIE**

Mycie i dezynfekcja urządzeń medycznych wrażliwych na działanie alkoholu np. inkubatory. Mycie i dezynfekcja sprzętu medycznego raz wszelkiego rodzaju powierzchni. **Cleanisept®** może być używany we wszystkich obszarach przemysłu spożywczego i stołówek. Preparat jest polecany do dezynfekcji i mycia wanien i powierzchni ze szkła akrylowego.

**SPOSÓB UŻYCIA**

**Cleanisept®** może być stosowany do mycia i dezynfekcji ::

1. przez metodę mycia i wycierania, np. „dwóch wiader” lub podobną,
2. przez dozowanie z centralnych lub niecentralnych urządzeń dozujących (BAM sprawdzony dla urządzeń - DG 3),
3. przez rozpylanie z urządzeń stacjonarnych lub mobilnych,
4. przez dozowanie z butelek lub worków dozujących

**MIKROBIOLOGIA**

**Cleanisept®** działa:

- bakteriobójczo (włącznie z **MRSA**) grzybobójczo (*C. albicans*)
- wirusobójczo: Vaccinia, BVDV, HBV, HIV, HCV, Papowa/ Polyoma, Rota.

**STEŻENIA UŻYTKOWE**

Bakterie, (włącznie z **MRSA**), grzyby (*C. albicans*)/ drożdże wg DGHM/ VAAH (z podwyższonym obciążeniem organicznym)

|        |         |
|--------|---------|
| 2,5 %  | 15 min  |
| 2,0 %  | 30 min  |
| 1,00 % | 60 min  |
| 0,75 % | 4 godz. |
| 7,50 % | 1 min.* |

Krótką dezynfekcja:

\* na liście VAAH w kolumnie 5 min.

Dezaktywuje wszystkie wirusy otoczkowe wg. RKI włącznie HBV, HIV, Vaccinia, HCV, BVDV

|       |         |
|-------|---------|
| 2,5 % | 5 min.  |
| 2,0 % | 15 min  |
| 7,5 % | 30 sek. |

Papowa/ Polyoma

|       |        |
|-------|--------|
| 2,0 % | 30 min |
| 7,5 % | 2 min  |

Rota

|       |         |
|-------|---------|
| 0,5 % | 30 sek. |
|-------|---------|

**Czas reakcji wg DVG 7/2003** (dezynfekcja w obszarze spożywczym):

|                                          |       |        |
|------------------------------------------|-------|--------|
| Bakteriobójcze (małe nasilenie): kol. 6a | 1,0 % | 30 min |
| Grzybobójcze (małe nasilenie): kol. 7a   | 0,5 % | 30 min |
| Bakteriobójcze (duże nasilenie): kol. 8a | 1,5 % | 30 min |
| Grzybobójcze (duże nasilenie): kol. 9a   | 1,5 % | 30 min |

**CZAS DZIAŁANIA WG. NORM EUROPEJSKICH**

| Obciążenie | EN 1276<br>działanie<br>bakteriobójcze | EN 1650<br>działanie<br>grzybobójcze | EN 13697<br>działanie<br>bakteriobójcze | EN 13697<br>działanie<br>grzybobójcze |
|------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Niskie     | 0,25%<br>5 minut                       | 0,5%<br>5 minut                      | 0,25%<br>5 minut                        | 0,5%<br>5 minut                       |
| Wysokie    | 0,5%<br>5 minut                        | 0,75%<br>5 minut                     | 0,5%<br>5 minut                         | 0,75%<br>5 minut                      |



# CLEANISEPT®

## Koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni

### SKŁAD

100 g koncentratu zawiera:

3,33 g chlorku didecyldimetyloamoniowego

6,66 g czwartorzędowe związki amoniowe, chlorki bezylo-C<sub>12-16</sub>-alkilodimetylowe

Wszystkie tenzydy zawarte w produkcie ulegają biodegradacji zgodnie z dyrektywą EU 648/2004.

### DANE FIZYKO - CHEMICZNE

Wygląd koncentratu: klarowny, bezbarwny płyn

Wartość pH: 7,25 +/- 1,25

### DOSTĘPNE OPAKOWANIA

| Pojedyncze opakowania | Jedn. sprzedaży | Nr katalogowy |
|-----------------------|-----------------|---------------|
| 2 L butelka           | 6 x 2 L         | 204000-002L   |
| 5 L kanister          | 3 x 5 L         | 204000-005L   |
| 10 L kanister         | 1 x 10 L        | 204000-010L   |

### DOZOWNIKI

pompka dozująca do butelki 2 L, kanistra 5 i 10 L, kran do kanistra, otwieracz do kanistra.

### UWAGI

Działa drażniąco na skórę. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić okulary lub ochronę twarzy. Stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny. Zaleca się pracę w rękawicach ochronnych.

Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z informacją na etykiecie preparatu.

### EKSPERTYZY

**Prof. Dr. Werner**, higienista, Bischofshofen: Ekspertyza dot. skuteczności środka wobec wirusa SV40/ Polioma. Ekspertyza dot. dezynfekcji powierzchni wg DGHM / VAH. Raport specjalisty dot. dezynfekcji w obszarze spożywczym wg DVG (2007). Ekspertyza dot. skuteczności wobec bakterii i grzybów wg normy EN 1276, EN 1650 i EN 13697.

**Prof. Dr. Schubert**, higienista, Frankfurt nad Menem: Raport specjalisty dot. skuteczności dezynfekcji powierzchni wg DGHM/ VAH.

**Dr. Brill**, higienista, Hamburg: Raport specjalisty dot. dezynfekcji w obszarze spożywczym wg DVG (2007). Badanie dot. stałości mikrobiologicznej preparatu Cleanisept® użytego w systemie Desco Wipes. Ekspertyza dot. dezynfekcji powierzchni chustami Desco Wipes nasączonymi preparatem Cleanisept®.

**Dr. Steinmann**, wirusolog, Brema: Ekspertyzy dot. skuteczności środka wobec: wirusów Rota, wirusów Vaccinia, wirusów BVDV (HCV).

**BAM (Niemiecki Instytut badania materiału)**- Raport dot. rozrzedzania koncentratu środka dezynfekującego w urządzeniu dozującym GD 3 (włączony w aneks listy RKI).

**Schmitz & Söhne**, Wickede: Opinia dot. stosowania środka do urządzeń medycznych i materacy firmy Schmitz & Söhne, marzec 2006.

### REJESTRACJA

Figuruje na aktualnej liście środków dezynfekcyjnych DGHM / VAH.

Figuruje na aktualnej liście środków dezynfekcyjnych w zakresie środków spożywczych DVG (Niemieckie Towarzystwo Medyczno-Weterynaryjne).

Figuruje na liście środków wirusobójczych IHO.

Zarejestrowany jako wyrób medyczny zgodnie z wytycznymi UE 93/42 EC.

### PRODUCENT

Dr Schumacher GmbH

Am Roggenfeld 3

D-34323 Malsfeld