




DESCOCEPT SPEZIAL

Bezalkoholowy środek do mycia
i szybkiej dezynfekcji

- ✓ nie zawiera alkoholu
- ✓ nie zawiera aldehydów
- ✓ nie zawiera fenoli

- Polecany szczególnie do szkła akrylowego
- O wysokim efekcie myjącym
- O krótkim czasie działania

aplikacja
w postaci piany




CE 0482



TYP PREPARATU

Descosept Spezial to płynny, gotowy do użycia, bezalkoholowy środek na bazie nowoczesnych czwartorzędowych związków amoniowych. Przeznaczony jest do szybkiej dezynfekcji i mycia urządzeń i wyrobów medycznych oraz wszelkiego rodzaju powierzchni szczególnie wrażliwych na działanie alkoholu. Szczególnie polecany do szkła akrylowego i głowic ultrasonograficznych. Posiada wysokie właściwości czyszczące oraz krótki czas działania.

ZASTOSOWANIE

Szybkie mycie i dezynfekcja wyrobów medycznych, urządzeń medycznych i wszelkiego rodzaju powierzchni szczególnie wrażliwych na działanie alkoholu. Zalecany do szkła akrylowego. Descosept Spezial dobrze rozpuszcza tłuszcze dlatego polecany jest również do mycia i dezynfekcji solariumów i urządzeń opalających wykorzystujących lampy wysokociśnieniowe.

SPOSÓB UŻYCIA

Spryskać powierzchnie lub przedmioty preparatem Descosept Spezial (powierzchnie muszą być dokładnie zwilżone), po wymaganym czasie ekspozycji przetrzeć powierzchnie lub przedmioty jednorazowym ręcznikiem.

CZAS DZIAŁANIA

Descosept Spezial działa na:

bakterie (włącznie z MRSA), grzyby (C. albicans), wg DGHM / ÖGHMP/ VAH (*na liście VAH w kolumnie 5 min.) (z wysokim obciążeniem biologicznym)	konc.	1 min.*
dezaktywuje wirusy: Vaccinia, BVDV, HBV, HIV, HCV, wirus grypy wg. RKI	konc.	30 sek.
Rota	konc.	30 sek.
SV40/ Polyoma wg. EN 14476	konc.	2 min.

SKŁAD

100 g środka zawiera:
0,50 g chlorku alkilobenzylodimetyloamoniowego
0,25 g chlorku didecylodimetyloamoniowego

DANE FIZYKO - CHEMICZNE

Wygląd: klarowny, bezbarwny płyn
Wartość pH koncentratu: 6 - 8



DESCOCEPT SPEZIAL

Bezalkoholowy środek do mycia i szybkiej dezynfekcji

DOSTEPNE OPAKOWANIA

Pojedyncze opakowania	Jednostka sprzedaży	Nr katalogowy
1 L butelka	10 x 1 L	232000-001L
5 L kanister	3 x 5 L	323000-005L

DOZOWNIKI

Głowica spieniąca do butelek 1 L, głowica rozpylająca do butelek 1L, pompka dozująca do kanistra 5 L, kran do kanistra, otwieracz do kanistra

UWAGI

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W przypadku kontaktu z oczami przemyć dużą ilością wody. Puste pojemniki muszą być usuwane w sposób bezpieczny.

REJESTRACJA

Figuruje na aktualnej liście DGHM/VAH.

Figuruje na aktualnej liście ÖGHMP.

Figuruje na niemieckiej liście IHO (www.iho-viruzidie-List.de).

Zarejestrowane jako wyrób medyczny zgodnie z wytycznymi UE 93/42 EEC.

Przed użyciem należy zapoznać się z ulotką lub etykietą na opakowaniu.

EKSPERTYZY

Prof. Werner, higienista, Bischofshofen: raport ekspertów dotyczący dezynfekcji powierzchni wg. wytycznych DGHM/VAH.

Opinia ekspercka dot. skuteczności preparatu przeciwko wirusom SV40/Polyoma wg. EN 14476.

Prof. Dr. Schubert, higienista, Frankfurt nad Menem: raport ekspertów dot. dezynfekcji powierzchni wg. wytycznych DGHM/VAH.

Dr. Steinmann, wirusolog, Brema: Opinia ekspercka dot. skuteczności preparatu przeciwko wirusom Vaccinia.

Opinia ekspercka dot. skuteczności preparatu przeciwko wirusom BVDV.

Opinia ekspercka dot. skuteczności preparatu przeciwko wirusom Rota.

PRODUCENT

Dr Schumacher GmbH

Am Roggenfeld 3

D-34323 Malsfeld