

Duck Bag

Transport i przechowywanie
zanieczyszczonych instrumentów

- Bezpieczne dla instrumentów
- Jednorazowe, łatwe w użyciu
- Działanie bakteriostatyczne
- Roztwór enzymatyczny, działanie w temperaturze pokojowej
- Przedłużona żywotność instrumentów
- Inhibitory korozji
- Dostępne w 3 rozmiarach:
 - szerokość 420 mm x długość 470 mm (1/2 DIN)
 - szerokość 400 mm x długość 780 mm (1/1 DIN)
 - szerokość 600 mm x długość 1000 mm (Super Size)



Jednorazowe worki foliowe ze szczelnym zamknięciem strunowym przeznaczone do transportu i przechowywania brudnych narzędzi i instrumentów w wilgotnym środowisku. W zestawie z saszetką zawierającą roztwór neutralnego cztero-enzymatycznego detergentu wykazującego działanie bakteriostatyczne. Detergent bezpieczny dla narzędzi i instrumentów wykonanych ze stali nierdzewnej, szkła, aluminium, tworzyw sztucznych. Na workach międzynarodowy symbol zagrożenia biologicznego w kolorze czerwonym. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy 1.

Worki Medisafe Duck Bag zapobiegają wysychaniu zanieczyszczonych instrumentów podczas transportu z miejsca użycia do Centralnej Sterylizatorni. Umieść tacę z zanieczyszczonymi instrumentami w przezroczystym worku i zamknij, by utrzymać je w stanie wilgotnym.

Międzynarodowe wytyczne oraz producenci instrumentarium zalecają przeprowadzić mycie instrumentów nie później niż 30 minut od ich użycia, aby uniknąć zasychania pozostałości organicznych, a w szczególności krwi i białek prionowych, na powierzchni instrumentów. Stosując worki Duck Bag przedłużamy ten czas nawet do 5 dni poprzez niedopuszczenie do zaschnięcia pozostałości i przytwierdzeniu białek na powierzchni instrumentów.

Nr katalogowe:

M20350 – 1/2 DIN

M20351 – 1/1 DIN

M20352 – Super Size





Duck Bag

Transport i przechowywanie
zanieczyszczonych instrumentów




Nazwa:	Duck Bag
Klasyfikacja:	Wyrób medyczny klasy 1
Skład:	Neutralny roztwór proteazy HT, proteazy LT, lipazy i amylazy oraz inhibitorów korozji i czynników powierzchniowo czynnych
Warunki przechowywania:	2°C - 38°C
pH:	7,5 – 8,2
Czas przydatności:	2 lata – dotyczy tylko saszetki
Opakowania:	50 szt.


Instrukcja użytkowania:



1. Opróżnij saszetkę preparatu do worka Duck Bag.

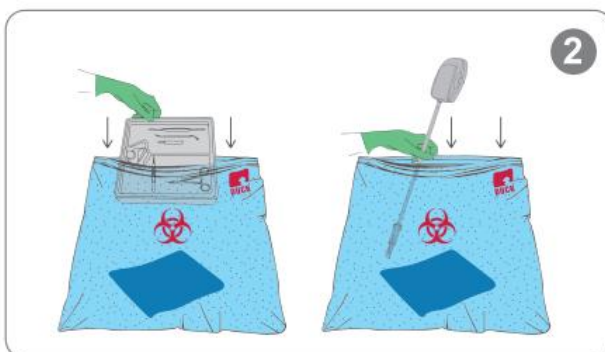


2. Umieść instrumenty w worku Duck Bag.

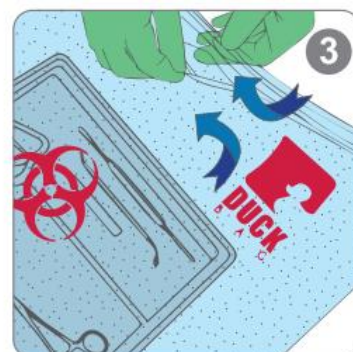

3. Szczelnie zamknij worek Duck Bag aby zapewnić wilgotne środowisko



4. Przetransportuj instrumenty do Centralnej Sterylizatorni

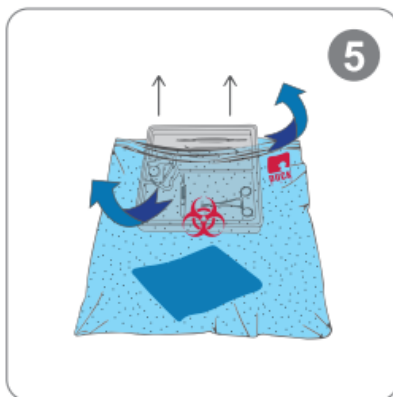

5. Wyjmij narzędzia i przeprowadź procedurę mycia i dezynfekcji zgodnie z zaleceniami producenta narzędzi



6. Zużyty worek Duck Bag wyrzuc do pojemnika na odpady skażone