



PERFEKTAN® EXTRA

- ✓ nie zawiera aldehydów
- ✓ nie zawiera fenoli

Preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi

- Niezawierający aldehydów środek do dezynfekcji o dużej sile mycia
- Jednoczesne mycie i dezynfekcja
- Działanie bakteriobójcze, grzybobójcze, prątkobójcze, wirusobójcze



CE 0482

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Perfektan® Extra jest silnym środkiem do dezynfekcji narzędzi, który łączy doskonale właściwości myjące z wysoką kompatybilnością materiału.

Perfektan® Extra zawiera niezwykle skuteczne inhibitory korozji, nie zawiera aldehydów ani fenoli. Dzięki doskonałej sile mycia możliwa jest dezynfekcja przy jednoczesnym myciu. Niezawierająca aldehydów formuła pozwala uniknąć koagulacji białka. Dla bezpieczeństwa i ochrony personelu możliwa jest natychmiastowa dezynfekcja bez uprzedniego mycia.

ZASTOSOWANIE

Perfektan® Extra idealnie nadaje się do mycia i dezynfekcji wszelkiego rodzaju narzędzi chirurgicznych, w tym narzędzi stosowanych podczas chirurgii mikroinwazyjnej (MIS), materiałów anestezyjologicznych oraz endoskopów sztywnych. Odpowiedni do stosowania w myjniach ultradźwiękowych i cyrkulacyjnych. **Perfektan® Extra** może być stosowany do szybkiej dezynfekcji i mycia, podczas jednego etapu.

SPOSÓB UŻYCIA

Natychmiast po użyciu zanurzyć narzędzia w roztworze użytkowym. Wszystkie powierzchnie i zagłębienia muszą być całkowicie pokryte roztworem użytkowym. Po odpowiednim czasie ekspozycji narzędzia należy dokładnie wypłukać czystą wodą. Zalecane jest przeprowadzenie płukania końcowego wodą demineralizowaną a następnie wysuszenie narzędzi.

Roztwór użytkowy powinien zostać wymieniony w zależności od stopnia zabrudzenia. Dostępne są opinie ekspertów na temat czasu przydatności roztworu użytkowego.

Wskazówka: przy bardzo zabrudzonych narzędziach można jedynie stosować dodatkowe środki myjące na bazie niejonowych środków powierzchniowo czynnych, np. **Instru-Plus**.

Do konserwacji zawiasów stosować **Spezial Öl** spray.

MIKROBIOLOGIA

Perfektan® Extra działa:

- bakteriobójczo (włącznie z MRSA)
- prątkobójczo
- grzybobójczo (*Candida albicans*)
- wirusobójczo (HBV, HIV, HCV, BVDV, Vaccinia, wirus grypy)

CZAS DZIAŁANIA

Bakteriobójczo włącznie z MRSA, grzybobójczo zgodnie z normą EN 1276/ EN 1650	0,25%	5 min.
Tbc	5%	60 min.
Skuteczny wobec wszystkich wirusów otoczkowych włącznie z: HBV/ HIV/ HCV/ Vaccinia/ BVDV	0,25%	5 min.

SKŁAD

100 g. zawiera:

5.63 g didecyloxyethylmethyl ammonium propionate, kationowe środki powierzchniowo czynne < 5%, niejonowe środki powierzchniowo czynne 5 - 15%.

Wszystkie środki powierzchniowo czynne wchodzące w skład produktu ulegają biodegradacji zgodnie z wytycznymi UE

DANE FIZYKO - CHEMICZNE

Forma / kolor:	klarowny, zielony płyn
Wartość pH:	ok. 9,4
Gęstość	ok. 1,005 g / ml



PERFEKTAN® EXTRA

Preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi

DOSTEPNE OPAKOWANIA

Pojedyncze opakowania	Jedn. sprzedaży	Nr katalogowy
2 L butelka	6 x 2 L	1220EX-002L
5 L kanister	3 x 5 L	1220EX-005L

AKCESORIA

Pompka dozująca do butelki 2 L i kanistra 5-litrowego, kran do kanistra, otwieracz do kanistra, automat dozujący

UWAGI

Przed pierwszym użyciem środka **Perfektan® Extra** należy wszystkie narzędzia i wanny dezynfekcyjne dokładnie umyć czystą wodą z użyciem środka **Desco Cleaner**, aby całkowicie usunąć pozostałości innych środków chemicznych (aldehidów). **Perfektan® Extra** nie nadaje się do dezynfekcji masek krztaniowych. Powoduje poparzenia. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza — jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.

EKSPERTYZY

Prof. Dr. Werner, higienista, Schwerin:

Raport eksperta dot. skuteczności bakteriobójczej zgodnie z normą EN 1276. Raport eksperta dot. skuteczności grzybobójczej zgodnie z normą EN 1650. Raport eksperta dot. skuteczności prątkobójczej zgodnie z normą EN 14348.

Dr Steinmann, wirusolog, Brema:

Raport eksperta dot. skuteczności wirusobójczej wobec BVDV (HCV). Raport eksperta dot. skuteczności wirusobójczej wobec wirusów Vaccinia.

REJESTRACJA

Zarejestrowany jako wyrób medyczny zgodnie z wytycznymi UE 93/42/ EEC.

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Środki firmy Dr. Schumacher GmbH są produkowane zgodnie z nowoczesną, bezpieczną i przyjazną dla środowiska technologią. Zgodność z wysokimi standardami jakości jest gwarancją stałej i bardzo dobrej jakości produktu. Firma posiada certyfikat DIN EN ISO 13485, DIN EN 9001, DIN EN 14001 & BS OHSAS 18001 oraz posiada walidowany System Eko zarządzania i Audytu (EMAS).

PRODUCENT

Dr Schumacher GmbH

Am Roggenfeld 3

D-34323 Malsfeld