



THERMO CLEAR

- ✓ zawiera inhibitory korozji
- ✓ zawiera specjalne składniki zmiękczające

Środek myjąco-płuczający do kaczek i basenów

- zapobiega osadzaniu się kamienia w myjniach do kaczek i basenów
- zapobiega powstawaniu smug i zacieków
- niskopieniący



TYP PREPARATU

Thermo Clear przeznaczony jest do mycia i termicznej dezynfekcji basenów i kaczek w automatycznych myjniach-dezynfektorach. Środek zapobiega powstawaniu smug i zacieków, zapobiega osadzaniu się kamienia kotłowego w myjniach. Jest preparatem niskopieniącym.

Thermo Clear ulega biodegradacji (wg. wytycznych UE dotyczącej detergentów) ponieważ opiera się na kwasie cytrynowym.

ZASTOSOWANIE

Thermo Clear idealnie nadaje się do mycia i termicznej dezynfekcji basenów i kaczek w automatycznym myjniach-dezynfektorach wodzących producentów.

Thermo Clear zapobiega osadzaniu się kamienia kotłowego w myjniach do kaczek i basenów.

Nie stosować w myjniach wykorzystujących metodę nietermiczną oraz w myjniach- dezynfektorach do kaczek i basenów wyprodukowanych przez firmę Arjo.

SPOSÓB UŻYCIA

Kaczki i baseny umieścić w myjni zgodnie z instrukcją (np. wg planu higieny). W procesie mycia wszystkie powierzchnie i zagłębienia muszą być dostępne dla preparatu. Przy stosowaniu do końcowego płukania należy postępować zgodnie ze wskazówkami producenta basenów.

Uwaga dotycząca ustawienia programu: 30°C

Nie dodawać w temperaturze poniżej 30°C.

STEŻENIA UŻYTKOWE

W zależności od zabrudzenia i twardości wody 1-3 ml/L (patrz wskazówki producenta) (0,1 – 0,3%)

Preparat może być dozowany w ilości 0,5 ml na każde 5°dH

Środek musi być dozowany przez wykwalifikowany personel!

SKŁAD

Kwas cytrynowy, inhibitory korozji, anionowe związki powierzchniowe, czynnik kompleksujący.

DANE FIZYKO - CHEMICZNE

Wygląd koncentratu:	klarowny, bezbarwny roztwór
Wartość pH koncentratu	2,0 +/- 0,5
Gęstość (w 20°C) :	1,045 g/ml

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

Pojedyncze opakowania	Jedn. sprzedaży	Nr artykuły
5 L kanister	3 x 5 L	127000-005L

AKCESORIA

Kran do kanistra, klucz do kanistra.

UWAGI

Działa drażniąco na oczy i skórę. Unikać kontaktu z oczami. W przypadku kontaktu z oczami lub skórą przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci!

REJESTRACJA

Zarejestrowany jako wyrób medyczny zgodnie z wytycznymi UE 93/42/ EEC

PRODUCENT

Dr Schumacher GmbH
Am Roggenfeld 3
D-34323 Malsfeld