

Czyszczenie przeciwdrobnoustrojowe

DECONTAMAN PRE WIPES

Chusteczki z 2% chlorheksydyną

- Praktyczne i szybkie w użyciu dzięki najwyższej jakości włókninie, bez konieczności płukania, nadają się do mikrofalówki
- Do przedoperacyjnego, przeciwdrobnoustrojowego mycia i odkażania pacjenta bez użycia wody
- Szeroki zakres skuteczności wobec bakterii, w tym wieloopornych patogenów

Opis produktu

DECONTAMAN PRE WIPES to gotowe do użycia chusteczki do delikatnego, przeciwdrobnoustrojowego mycia skóry. Duże chusteczki wykonane są z wytrzymałej, przyjaznej dla skóry włókniny i są impregnowane łagodnym roztworem dezynfekującym zawierającym 2% chloroheksydyny. Po umyciu skóry chusteczkami DECONTAMAN PRE WIPES nie ma konieczności płukania jej wodą. Dzięki pozostającej na skórze powłoce z substancji czynnej można osiągnąć trwające 24 godziny działanie przeciwbakteryjne. Z tego względu chusteczki DECONTAMAN PRE WIPES są idealne do szybkiego i dokładnego mycia skóry w przypadku kolonizacji przez wielooporne patogeny i można je stosować w szczególności w ramach przedoperacyjnego przygotowania pacjenta.

Obszary zastosowania

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie produktów biobójczych (BPR): Profesjonalne, antybakteryjne czyszczenie skóry, szczególnie w przypadku kolonizacji bakteriami wielolekowymi i przed pobytem ambulatoryjnym lub stacjonarnym (przedoperacyjna).

Zastosowanie

Ściereczki z opakowania wyjąć, zetrzeć region skóry do oczyszczenia i pozostawić co najmniej 1 minutę. Użyj nowej ściereczki dla każdego regionu skóry, zgodnie z całym schematem mycia ciała.



Zakres działania i wymagane czasy kontaktu		1 min	3 min	5 min
działanie bakteriobójcze	EN 13727	niskie obciążenie	•	
		wysokie obciążenie		•
działanie drożdżakobójcze (Candida albicans)	EN 13624	niskie obciążenie		•
		wysokie obciążenie		•

Wskazówki dotyczące zastosowania

Ogrzać. Nie stosować u niemowląt lub w przypadkach znanej nietolerancji na chlorheksydynę. Unikać kontaktu z oczami, uszami i uszkodzoną skórą. Nie nadaje się do dezynfekcji skóry przed zabiegami inwazyjnymi / przedoperacyjną dezynfekcją skóry.



w mikrofalówce (600 W - 20 sekund). Czasy trwania ogrzewania w mikrofalówce mogą się różnić. Przed użyciem chusteczek należy się upewnić, że nie są zbyt gorące. Nie ogrzewać ponownie otwartych już opakowań. Chusteczki są przeznaczone do jednorazowego użycia.

Skład

100 g roztworu zawiera: 2 g Diglukonian chlorheksydyny. Zawiera perfumy.

Opinie

Nasze produkty zostały w pełni poddane ekspertyzie. Zainteresowanym z przyjemnością udostępnimy naszą teczkę z opiniami ekspertów.

Zwroty wskazujące środki ostrożności i rodzaj zagrożenia

Działa drażniąco na oczy. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Unikać uwolnienia do środowiska. Zawartość/pojemnik usuwać do zatwierdzonych przedsięwzięć zbierania lub usuwania odpadów.

Tylko do użytku profesjonalnego.



DECONTAMAN PRE WIPES

Przeciwdrobnoustrojowe chusteczki do czyszczenia

MYCIE CAŁEGO CIAŁA

Mycie pacjenta i oczyszczanie przeciwdrobnoustrojowe z zastosowaniem gotowych do użycia chusteczek do mycia i rękawic

1 Twarz

Umyć całą twarz. Podczas całej czynności oczy muszą być zamknięte. Stosować chusteczki ostrożnie w obszarach wokół oczu, aby uniknąć dostania się płynu do oczu. Podczas mycia uszu należy uważać, aby nie dostał się do nich płyn.

2 Klatka piersiowa/brzuch

Zdjąć ubranie z górnej części ciała i umyć tułów od szyi w dół do pępka. Dbać o ciepło dolnej części ciała.

3 4 Ręce

Począwszy od końcówek palców, umyć dłonie, przedramiona i ramiona, a zwłaszcza doły pachowe.

5 Plecy

Posadzić pacjenta lub obrócić go na bok. Począwszy od zewnątrz, umyć szyję i plecy ruchami skierowanymi do wewnątrz. Ubrać pacjenta i obrócić do na plecy.

6 7 Nogi

Zdjąć ubranie z dolnej części ciała. Myć nogi ruchem do góry aż do ud w kierunku serca.

8 Stopy

Mycie stóp rozpocząć od palców. Ze względów higienicznych okolicę narządów płciowych i pośladki należy myć jako ostatnie.


9 Okolice narządów płciowych

Przeprowadzić pielęgnację strefy intymnej.

10 Pośladki

Obrócić pacjenta na bok i umyć pośladki oraz okolicę odbytu.

Sugerowane produkty:
DECONTAMAN PRE WIPES,
DECONTAMAN PRE CAP,
OPTIWASH, DESOBATH WIPES

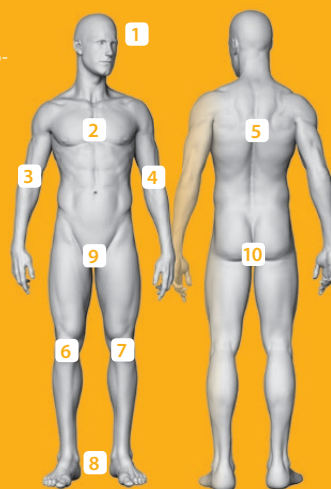

Produkt	Opakowanie	Zawartość	J. op.	Wielkość	Numer artykułu
DECONTAMAN PRE WIPES	pakowanie	10 ściereczki	24	20 x 30 cm	00-530-T010EXP



Dostępność produktów i opakowań zależy od dokonanej rejestracji krajowej.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Dr. Schumacher is certified according to DIN EN 13485, DIN EN ISO9001, DIN EN ISO14001, BS OHSAS 18011 and has a validated environment management system according to EMAS and is a member of IHO, VCI, BAH, DGSV and of the DGKH. www.schumacher-online.com