

Kołdra zmywalna MediSleep - instrukcja mycia/dezynfekcji

Zastosowanie: Kołdry zmywalne MediSleep znakomicie sprawdzają się w szpitalach, domach opieki, karetkach, hotelach, hospicjach oraz wszędzie tam gdzie jest potrzeba zabezpieczenia przed przemoczeniem, zabrudzeniem oraz w miejscach gdzie istnieje ryzyko infekcji oraz migracji drobnoustrojów.

Kołdra nie powinna być prana. Materiał jest kompatybilny z powszechnie stosowanymi środkami do mycia / dezynfekcji.

Standardowe mycie.

W przypadku, kiedy powierzchnia kołdry nie jest zanieczyszczona materiałem organicznym lub nie była używana przez pacjenta, u którego stosowano izolację kontaktową, wystarczy przetrzeć ją ściereczką nasączoną wodą z detergentem lub gotowymi chusteczkami z detergentem. Po umyciu należy ją wytrzeć do sucha.

Dezynfekcja

W przypadku stosowania kołdry przez pacjentów w izolacji kontaktowej należy dezynfekować ją poprzez przetarcie ściereczką nasączoną preparatami do dezynfekcji, z określonym spektrum działania wobec danego drobnoustroju.

U pacjentów, u których nie została określona w badaniach flora bakteryjna, należy po użyciu zdezynfekować kołdrę środkami dezynfekcyjnymi mającymi w składzie alkohol lub czwartorzędowe związki amoniowe, lub mieszaninę tych substancji, w stężeniu i czasie zalecanym przez producenta środka dezynfekcyjnego do dezynfekcji małych powierzchni.

W przypadku wizualnego zanieczyszczenia kołdry, należy ją przed dezynfekcją przetrzeć ściereczką nasączoną wodą z detergentem, tak żeby usunąć zanieczyszczenia, a następnie wytrzeć do sucha.

Dezynfekcja z zastosowaniem preparatów sporobójczych

W przypadku możliwości zanieczyszczenia powierzchni kołdry sporami należy stosować preparaty do dezynfekcji na bazie chloru lub nadtlenu wodoru. Kołdrę należy przetrzeć ściereczką nasączoną danym preparatem, po wymaganym czasie kontaktu określonym przez producenta preparatu, kołdrę należy przetrzeć mokrą ściereczką, aby usunąć preparat do dezynfekcji, a następnie wytrzeć ją do sucha.

Zanieczyszczenie materiałem organicznym

W przypadku zanieczyszczenia kołder krwią, ropą, moczem, kałem i innymi wydzielinami należy jak najszybciej umyć i zdezynfekować kołdrę. Stosowane stężenia powinno być zgodne z zaleceniami producenta preparatu do dezynfekcji w przypadku usuwania plam płynów organicznych. Kołdrę należy przetrzeć ściereczką nasączoną danym preparatem, po wymaganym czasie kontaktu określonym przez producenta preparatu, kołdrę należy przetrzeć mokrą ściereczką, aby usunąć preparat do dezynfekcji, a następnie wytrzeć ją do sucha.

W przypadku dezynfekcji zawsze należy przestrzegać zaleceń producenta preparatu.

Materiał kołdry nie jest odporny na cięcie i należy go chronić przed wszelkimi uszkodzeniami mechanicznymi – producent nie ponosi odpowiedzialności za używanie uszkodzonego produktu.



MediSleep®
Grobla 51A 62-400 Stupca
Telefon: +48 733 221 903;
biuro@medisleep.pl; www.medisleep.pl

